



\* 1 0 1 - 0 0 9 E \*

2016年5月（第6版）新記載要領に基づく改訂  
\*2014年4月（第5版）

認証番号 220AABZX00099000

医療用品3 手術用手袋及び指サック  
管理医療機器 非天然ゴム製手術用手袋（JMDN：40549000）

## ディスポーザブル合成ゴム製手術用手袋

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

#### 【\*製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：  
メドライン・ジャパン合同会社  
電話 (03) 5842-8800

製造業者：  
カーディナルヘルス社（タイ国）  
Cardinal Health 222 (Thailand) Ltd.

#### 【形状・構造及び原理等】

本品は左右一対からなる非天然ゴムを使用した手術用手袋であり、医科及び歯科における手術の際に術者が手に装着して使用するものである。

#### 【使用目的又は効果】

医科及び歯科において手術の際に使用する非天然ゴム製の手術用手袋であり、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

#### 【使用方法等】

手袋は無菌的に取り出して装着し、使用する。

#### 【使用上の注意】

##### <重要な基本的注意>

- 1) 体質・使用状況によりかゆみ、かぶれ等の遅延性のアレルギー性症状（IV型一遅延型：主に加硫促進剤等の添加剤の化学物質による）を引き起こすことがある。装着後数時間後から症状が発現することがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。
- 2) 製品本体の特性上、鋭利なものに接触すると破れたり、穴があくことがあるため、使用前に損傷やピンホールのないことを十分に確認し使用すること。
- 3) 薬品、溶剤などにより膨潤したり浸透したりする可能性があるため、十分状態を確認の上使用すること。

##### <相互作用（他の医薬品・医療機器との併用に関すること）>

併用注意（併用に注意すること）

- 電気メス使用時に高周波回路が形成された場合、手袋の電氣的絶縁性が損なわれ、火傷を引き起こすことがあるため、注意すること。

##### <不具合・有害事象>

- その他の有害事象  
かゆみ、かぶれ等のアレルギー反応。

#### 【保管方法及び有効期間等】

保管の条件：室温下で、水濡れに注意し、直射日光、オゾン、紫外線、熱源、X線、高温多湿を避けて保管すること。

有効期間：本品の使用期限は包装に記載。[自己認証（自社データ）による]