



\* 1 0 7 - 0 0 2 C \*

2017年 7月 (第4版) 新記載要領に基づく改訂  
\*2014年 4月 (第3版)

届出番号 13B1X00062CON002

機械器具 29 電気手術器  
一般医療機器 単回使用電極クリーナー (JMDN : 70654000)

## Cautery チップクリーナー

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】


1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

#### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：  
メドライン・ジャパン合同会社  
電話 (03) 5842-8800

#### \*【形状・構造及び原理等】

##### 1. 形状

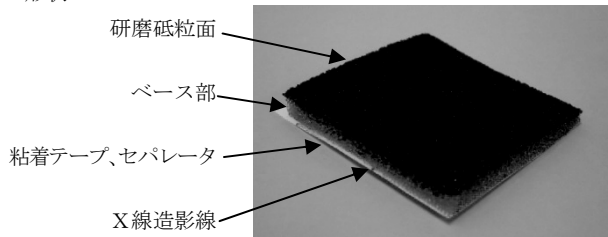

##### 2. 作動原理

本品は、研磨砥粒面に被研磨物を当てて擦ることにより、付着した炭化物等を取り除く。

#### 【使用目的又は効果】

アクティブ電極を使用した際、電極に付着した炭化物等の除去を目的とした、単回使用のクリーナーである。

#### 【使用方法等】

1. 本品を滅菌包装より無菌的に取り出す。
2. アクティブ電極に付着した炭化物等を研磨砥粒面に当てて擦るようにして除去する。
3. 裏面のシールをはがして、術衣、器械台などに貼り付けて、使用できる。また、指で山折りにしてバイポーラ用ピンセットの内側の付着物を除去することができる。

本品はディスポーザブル製品であるので、1回限りの使用のみで再使用できない。

#### 【使用上の注意】

##### <重要な基本的注意>

1. 複数の患者には使用しないこと。
2. 過度な力で擦らないこと。バイポーラ用ピンセット等の先端部を傷つけることがある。
3. 包装を開封したら、速やかに使用すること。
4. 本品の二次的加工をしないこと。
5. PTFE コーティング電極には使用しないこと。[コーティングがはがれるおそれがある。]

#### \*【保管方法及び有効期間等】

保管の条件：水濡れに注意し、直射日光、オゾン及び高温多湿を避けて保管すること。

有効期間：本品の使用期限は包装に記載。[自己認証(自社データ)による]