



2023年4月

お客様各位

メドライン・ジャパン合同会社

アクアパックヒューミディファイア-安全使用に関するご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

アクアパックヒューミディファイア-につきまして、アウトレットポート開封時にねじり開けることにより、開封部が閉塞する事例が確認されました。

正しい開封方法については添付文書に記載がございますが、別紙の開封方法資料を作成しましたのでこちらも参考にいただき、正しく開封をしていただけますようお願い申し上げます。

敬具

記

【対象製品】

製品画像	製品番号	製品名	最小受注単位	希望販売価格	JANコード
	003-40J	アクアパック 340(301 セット)	20 個/ケース	26,000 円	4026704627608
	003-01J	アクアパック 301	20 個/ケース	18,000 円	4026704627554
	006-40J	アクアパック 640(301 セット)	10 個/ケース	15,000 円	4026704627721
	006-01J	アクアパック 601	10 個/ケース	11,000 円	4026704627684

一般的名称：酸素吸入加温加湿装置用水
販売名：HUDSON RCI アクアパック
クラス分類：管理医療機器
医療機器認証番号：223AFBZX00074000
滅菌方法：ガンマ線滅菌

以上

メドライン・ジャパン合同会社

〒112-0002 東京都文京区小石川 1-4-1

住友不動産後楽園ビル 15 階

medline.co.jp

JQP851-M01-F2 10/07/20 [MJ-656]



【別紙】

アクアパックヒューミディファイアー開封方法



対象製品

003-01J/40J アクアパック 301/340 340mL

006-01J/40J アクアパック 601/640 650mL



正しい操作

アクアパックのアウトレットポートの
タブに人差し指を掛けて
(○印の部分)

手前に引くように折って
取り外してください。



正しく開けると「パキッ」と音が鳴ります

注意

ねじり開ける操作はしないでください。

開封後に開口部が開いているか確認してください。

ご使用の際は、添付文書をご確認ください。

